



Biyolojik Diş Beyazlatma

# Biyolojik Diş Beyazlatma

## ProOFFICE ve ProHOME



## Alkaline-HP & Nano-HAp Protokolü

**BioWhiten**

ProOffice ULTIMATE sisteminde hassasiyet oluşma riski %5'in altındadır ve birçok diş hekimi hassasiyet düzeyini sıfıra yakın olarak belirtmektedir.

ProOffice ULTIMATE protokolünde Hassasiyet giderici ürün kullanımına veya ilave önlemlere gerek yoktur.

Işık kaynağı ile ve Işık kaynaksız da kullanabilirsiniz.



SONUCU TAHMİN EDİLEBİLİR, HER TÜRLÜ VAKAYA UYGUN PROFESYONEL DİŞ BEYAZLATMA SİSTEMİ...

ULTIMATE NANO WHITENING



Düşük düzeyde Alkaline Hidrojen Peroksit (a-HP) yanında dişin kristal yapısıyla birebir uyumlu, dişe doğal rengini veren Nano-Hidroksiapatit (n-HAp) kristalleri içeren ve çift yönlü beyazlatma yapan sistemlere biyolojik beyazlatma denmektedir.

Bu tür sistemler ile etkin bir diş beyazlama uygulaması yanında, dişe eş zamanlı mineral takviyesi de (remineralizasyon) yapılabilmektedir.

Ofis, Ev ve Kombine (Ofis + Ev) sistemi aynı gün içinde herhangi bir yan etki ve hassasiyet oluşturmaksızın esnek uygulama imkanı sunar.

HASSASİYET SORUNU OLUŞTURMAYAN VE HASSAS  
DİŞLERE DE UYGULAMA İMKANI OLAN TEK BEYAZLATMA SİSTEMİ...



ULTIMATE NANO WHITENING



# BioWhiten

## In-office Whitening

Alkaline Hydrogen Peroxide & Nano-Hydroxyapatite

## Biological Tooth Whitening

BIOWHITEN ProOffice ULTIMATE  
En yüksek Beyazlatma etkinliği.  
En düşük Hassasiyet düzeyi ve  
maksimum Remineralizasyon.

Hassas Dişlere de Uygulanabilir!.



### Ürün

- 15ml Hydrogen Peroxide Şişesi & 15ml Nano-Hydroxyapatite Şişesi
- DİŞ ETİ BARIYERİ - 2.2 ml-şırınga
- İlave Hassasiyet giderici ve remineralizasyon jeli yoktur.  
Maksimum bio-uyumlu Nano-Hydroxyapatite kristalleri içerir.

### Ayarlanabilir Konsantrasyonlar

- 6% HP, ayarlanabilir 12% & 18 % HP

### Paketleme Tipi

- 2x 15ml Havasız Jel Şişeleri and 2x 2.2ml Bariyer - 3-4 Hastalık Kit

### Aksesuarlar

- MicroBrush karıştırma ve uygulama fırçası
- Karıştırma kapları and 5x5cm gazlı bezler
- Her bariyer şırıngası için 2 x uygulama ucu

ULTIMATE NANO WHITENING



# BioWhiten

## In-office Whitening

Hydrogen Peroxide & Nano-Hydroxyapatite

### Biological Tooth Whitening

BIOWHITEN ProOffice POWERHP 25%  
3 x15 dakikalık uygulama süresi ile  
kısa sürede ve en etkin beyazlatma imkanı.  
Rakiplerine göre 5 kat daha az Hassasiyet.



#### Ürün

- POWERHP - 2,5 ml çift gözlü şırınga
- DİŞ ETİ Bariyeri - 2.2 ml şırınga
- İlave Hassasiyet giderici ve remineralizasyon jeli yoktur.  
Bio-uyumlu Nano-Hydroxyapatite kristalleri içerir.

#### Mevcut Konsantrasyonlar

- 18% HP veya 25% HP

#### Mevcut Paketler

- 2 x 2,5ml POWERHP Şırınga and 1x2.2ml Bariyer - 2 Hastalık Kit
- 4 x 2,5ml POWERHP Şırınga and 2x2.2ml Bariyer - 4 Hastalık Kit

#### Aksesuarlar

- MicroBrush karıştırma ve uygulama fırçası
- Auto Mix Şırınga Ucu
- Her bariyer şırıngası için 2 x uygulama ucu



# BioWhiten

## Home Whitening

Alkaline Hydrogen Peroxide & Nano-Hydroxyapatite

## Biological Tooth Whitening

BIOWHITEN ProHome 6% HP  
Gündüz kullanım, maksimum 1 saat/gün.  
En kısa günlük Uygulama süresi,  
Sıfır Hassasiyet ve maksimum  
Remineralizasyon.



### Ürün

- 2.5ml çift gözlü şırınga
- İlave Hassasiyet giderici ve remineralizasyon jeli yoktur. Maksimum bio-uyumlu Nano-Hydroxyapatite kristalleri içerir.

### Konsantrasyon

- 6% HP,

### Paket İçeriği

- 4 x 2.5ml Şırınga- Toplam 14 gün kullanım süresi (her gün 1 saat)

### Aksesuarlar

- 4 x Auto Mix Şırınga Ucu

ULTIMATE NANO WHITENING

# SONUCU TAHMİN EDİLEBİLİR, HER TÜRLÜ VAKAYA UYGUN PROFESYONEL DİŞ BEYAZLATMA SİSTEMİ...



## Beyazlatma Yöntemi

## Uygulama Süresi

## Uygulama Sayısı



### ProOffice Ultimate

Hızlı tepkimeye giren Ofis Tipi Beyazlatma ALKALINE HP and nHAp Karışım ve en düşük hassasiyet oranı. (Hassas dişlere de uygulanabilir.) IŞIK KAYNAĞI GEREKTİRMEZ. Işık kaynağı kullanımında maksimum 39-40 C ısı düzeyi aşılmamalıdır.

6% HP & 12-18% Ölçeklenebilir Karışım  
5 x 10 dakika (maks. 8 x 10 dk)

1 sefer- 50 dakika veya 80 dakika.  
2nci Uygulama  
Çok istisnai durumlar, koyu dişler tetrasiklin v.b. durumlar için gerekli olabilir.



### ProOffice PowerHP

Etkin ve hızlı Ofis Tipi Beyazlatma Sistemi ve düşük hassasiyet oranı. IŞIK KAYNAĞI GEREKTİRMEZ. Işık kaynağı kullanıldığında maksimum 39-40 C ısı düzeyi aşılmamalıdır.

18% veya 25% HP & n-HAp Sistemi  
5 x 10 dakika veya 3 x 15 dakika

- 18% 1 Sefer 50 dakikak veya  
- 25% 1 Sefer - 45 dakika.  
Diş Hekimi ilave 1 x 15dk. veya 2 x 10dk. uygulamaya karar verebilir.



### ProHome - Home Whitening

Ev Tipi Beyazlatma Sistemi  
Kinik veya Evde kullanıma uygundur.  
Kişiyeye Özel Beyazlatma Plağı ile birlikte kullanılır.(Pakete dahil değildir.)

6% HP & n-HAp Sistemi  
Gündüz kullanım içindir,  
her gün 45 dk - 1 Saat kullanım.

4-14 Gün tek başına veya Ofis Tipi beyazlatma sonrası kombine beyazlatma için aynı gün kullanılandırılabilir.  
Diş Hekimi kesin kullanım süresine karar verir.



### ProBar Barrier

Işıkla Sertleşen, DİŞ ETİ BARIYERI

2.2ml Şırınga  
10-15 saniye ışık uygulaması ile donma süresi

1 şırınga 2 uygulama için kullanılabilir.  
(Alt ve üst çene dahil 2 uygulama)

# Biyolojik Diş Beyazlatma

Biodent Medical Ltd.

[www.biowhiten.com](http://www.biowhiten.com)

[info@biowhiten.com](mailto:info@biowhiten.com)

+90 216 545 5 595



## BioWhiten

En etkin ve en yeni nano-teknoloji formülasyona sahip diş beyazlatma sistemi olan BioWhiten, en basitten en karmaşık vakaya kadar farklı diş renklenmelerine karşı etkin bir beyazlatma sunar.

Normal renklenmeler yanında, tetrasiklin vakaları da dahil her türlü diş beyazlatmayı en uygun maliyetle yapmanıza imkan sağlar.



Diş Beyazlatma artık Hassasiyet ve Dişlerde aşınma ile birlikte anılmak zorunda değil.

ULTIMATE NANO WHITENING