




dual dental®



Biyolojik Diş Beyazlatma

Biyolojik Diş Beyazlatma

ProOFFICE ve ProHOME



Alkaline-HP & Nano-HAp Protokolü

BioWhiten


ProOffice ULTIMATE sisteminde hassasiyet oluşma riski %5'in altındadır ve birçok diş hekimi hassasiyet düzeyini sıfıra yakın olarak belirtmektedir.

ProOffice ULTIMATE protokolünde Hassasiyet giderici ürün kullanımına veya ilave önlemlere gerek yoktur.

Işık kaynağı ile ve Işık kaynaksız da kullanabilirsiniz.



SONUCU TAHMİN EDİLEBİLİR, HER TÜRLÜ VAKAYA UYGUN PROFESYONEL DİŞ BEYAZLATMA SİSTEMİ...

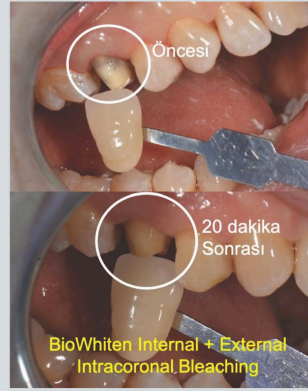

Düşük düzeyde Alkaline Hidrojen Peroksit (α -HP) yanında dişin kristal yapısıyla birebir uyumlu, dişe doğal rengini veren Nano-Hidroksiapatit (n-HAp) kristalleri içeren ve çift yönlü beyazlatma yapan sistemlere biyolojik beyazlatma denmektedir.

Bu tür sistemler ile etkin bir diş beyazlama uygulaması yanında, dişe eş zamanlı mineral takviyesi de (remineralizasyon) yapılabilmektedir.

Ofis, Ev ve Kombine (Ofis + Ev) sistemi aynı gün içinde herhangi bir yan etki ve hassasiyet oluşturmaksızın esnek uygulama imkanı sunar.

HASSASİYET SORUNU OLUŞTURMAYAN VE HASSAS
DİŞLERE DE UYGULAMA İMKANI OLAN TEK BEYAZLATMA SİSTEMİ...





BioWhiten

In-office Whitening

Hydrogen Peroxide & Nano-Hydroxyapatite

Biological Tooth Whitening

BIOWHITEN ProOffice POWERHP
3 x15 dakikalık uygulama süresi ile
kısa sürede ve en etkin beyazlatma imkanı.
Hassasiyet düzeyi %2 den daha az.

INTRAKORONAL BEYAZLATMAYA DA UYGUNDUR



Ürün

- POWERHP - 2,5 ml çift gözlü şırınga
- DİŞ ETİ Bariyeri - 2.2 ml şırınga
- İlave Hassasiyet giderici ve remineralizasyon jeli yoktur.
Bio-uyumlu Nano-Hydroxyapatite kristalleri içerir.

Mevcut Konsantrasyonlar

- 25% HP veya %18 HP

Mevcut Paketler

- 2 x 2,5ml POWERHP Şırınga and 1x2.2ml Bariyer - 2 Hastalık Kit
- 4 x 2,5ml POWERHP Şırınga and 2x2.2ml Bariyer - 4 Hastalık Kit

Aksesuarlar

- MicroBrush karıştırma ve uygulama fırçası
- Auto Mix Şırınga Ucu
- Her bariyer şırıngası için 2 x uygulama ucu

www.dualdental.com.tr info@dualdental.com.tr T: +90 212 532 00 85



BioWhiten

In-office Whitening

Hydrogen Peroxide & Nano-Hydroxyapatite

Biological Tooth Whitening

BIOWHITEN ProOffice POWERHP %40
3 x15 dakikalık uygulama süresi ile
kısa sürede ve en etkin beyazlatma imkanı.
Rakiplerine göre 5 kat daha az hassasiyet.



Ürün

- POWERHP %40 - 2,5 ml çift gözlü şırınga
- DİŞ ETİ Bariyeri - 2.2 ml şırınga
- İlave Hassasiyet giderici ve remineralizasyon jeli yoktur.
Bio-uyumlu Nano-Hydroxyapatite kristalleri içerir.

Konsantrasyon

- 40% HP

Mevcut Paketler

- 2 x 2,5ml POWERHP Şırınga and 1x2.2ml Bariyer - 2 Hastalık Kit
- 4 x 2,5ml POWERHP Şırınga and 2x2.2ml Bariyer - 4 Hastalık Kit

Aksesuarlar

- MicroBrush karıştırma ve uygulama fırçası
- Auto Mix Şırınga Ucu
- Her bariyer şırıngası için 2 x uygulama ucu

BioWhiten

Home Whitening

Alkaline Hydrogen Peroxide & Nano-Hydroxyapatite

Biological Tooth Whitening

BIOWHITEN ProHome 6% HP
Gündüz kullanım, maksimum 1 saat/gün.
En kısa günlük Uygulama süresi,
Sıfır Hassasiyet ve maksimum
Remineralizasyon.



Ürün

- 2.5ml çift gözlü şırınga
- İlave Hassasiyet giderici ve remineralizasyon jeli yoktur.
Maksimum bio-uyumlu Nano-Hydroxyapatite kristalleri içerir.

Konsantrasyon

- 6% HP,

Paket İçeriği

- 4 x 2.5ml Şırınga- Toplam 14 gün kullanım süresi (her gün 1 saat)

Aksesuarlar

- 4 x Auto Mix Şırınga Ucu

SONUCU TAHMİN EDİLEBİLİR, HER TÜRLÜ VAKAYA UYGUN PROFESYONEL DİŞ BEYAZLATMA SİSTEMİ...



	Beyazlatma Yöntemi	Uygulama Süresi	Uygulama Sayısı
	ProOffice PowerHP%40 nHP Ofis Tipi Beyazlatma nHP and nHAp Karışım ve en düşük hassasiyet oranı. Rakiplerine göre 5 kata daha az hassasiyet IŞIK KAYNAĞI GEREKTİRMEZ.	- 40% nHP & nHAp , 3 x 15 dakika	1 uygulama - 45 Dakika Diş hekimi ilave 1 x 15dk. veya 2 x 10dk uygulamaya karar verebilir
	ProOffice PowerHP %25-%18 Etkin ve hızlı Ofis Tipi Beyazlatma Sistemi ve düşük hassasiyet oranı. IŞIK KAYNAĞI GEREKTİRMEZ. Işık kaynağı kullanıldığında maksimum 39-40 C ısı düzeyi aşılmamalıdır.	- 25% HP & n-HAp Sistemi 3 x 15 dakika veya 4 x 10 dakika - 18% HP & n-HAp Sistemi 5 x 10 dakika	1 uygulama - 45 Dakika Diş hekimi ilave 1 x 15dk. veya 2 x 10dk uygulamaya karar verebilir 1 uygulama - 50 dakika Diş hekimi ilave 2 x 10dk. veya 3 x 10dk.uygulamaya karar verebilir
	ProHome - Home Whitening Ev Tipi Beyazlatma Sistemi Kinik veya Evde kullanıma uygundur. Kişiye Özel Beyazlatma Plağı ile birlikte kullanılır.(Pakete dahil değildir.)	6% HP & n-HAp Sistemi Gündüz kullanım içindir, her gün 45 dk - 1 Saat kullanım.	4-14 Gün tek başına veya Ofis Tipi beyazlatma sonrası kombine beyazlatma için aynı gün kullanılabilir. Diş Hekimi kesin kullanım süresine karar verir.
	ProBar Barrier Işıklı Sertleşen, DİŞ ETİ BARIYERİ	2.2ml Şırınga 10-15 saniye ışık uygulaması ile donma süresi	1 şırınga 2 uygulama için kullanılabilir. (Alt ve üst çene dahil 2 uygulama)

Biyolojik Diş Beyazlatma



Diş Beyazlatma artık Hassasiyet ve Dişlerde aşınma ile birlikte anılmak zorunda değil.

BioWhiten

En etkin ve en yeni nano-teknoloji formülasyona sahip diş beyazlatma sistemi olan BioWhiten, en basitten en karmaşık vakaya kadar farklı diş renklenmelerine karşı etkin bir beyazlatma sunar.

Normal renklenmeler yanında, tetrasiklin vakaları da dahil her türlü diş beyazlatmayı en uygun maliyetle yapmanıza imkan sağlar.



DD Tıbbi Gereçler San ve Tic Ltd Şti. Molla Gürani Cad No:49 Fındıkzade 34093 İstanbul
+90 212 532 00 85 pbx. WhatsApp +90 552 210 29 14
www.dualdental.com.tr, info@dualdental.com.tr